

Einfache Anwendung

Keine zusätzlichen Instrumente zur Einführung erforderlich

Einheitsgröße

Für alle Magensonden bis zu 18 Fr

Wirtschaftlichkeit

Eine schnelle Platzierung der Magensonde spart wertvolle OP-Zeit



Gastric Tube Guide

Einführhilfe zur oralen Platzierung von Magensonden

Gastric Tube Guide

Einführhilfe zur oralen Platzierung von Magensonden.

Zur Vermeidung von nasalen Verletzungen werden Magensonden, die postoperativ nicht mehr benötigt werden, in der Regel oral platziert. Dies betrifft Patienten, die einen Eingriff per Laparotomie oder Laparoskopie ohne Eröffnung des Darms oder Magens benötigen. Dabei wird nach endotrachealer Intubation über den Mund eine Magensonde

positioniert.


Die Einführung einer Magensonde ist oftmals schwieriger und zeitintensiver als andere anästhesiologische Vorgänge (Intubation, i.v.-Zugang, etc.).

Der Gastric Tube Guide ist die perfekte Hilfe, um die Magensonde schnell, effektiv und komplikationslos oral zu legen.



Schnell und einfach

Der Einführtrichter am proximalen Ende garantiert ein schnelles und einfaches Einführen aller Arten von Magensonden (PVC, Polyurethan, Silikon).

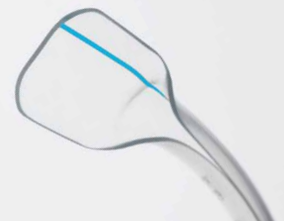

Design


Der vorgeformte Tubus ermöglicht ein Einführen ohne zusätzliche Instrumente. Die Einführtiefe kann mit Hilfe der Längenmarkierungen (cm) kontrolliert werden.

Nach Platzierung der Magensonde wird der Gastric Tube Guide einfach über den Schlitz entfernt.



Atraumatisch

Die weiche und abgeschrägte Spitze schützt die Schleimhaut während der Platzierung.

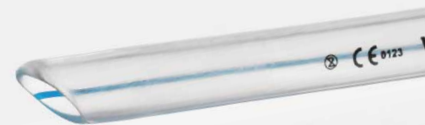

Bestellinformation

Gastric Tube Guide

zum Einmalgebrauch, Material: PVC, steril

REF 49-40-018-1

VE 10

Spezifikationen

A.D.	10,3 mm	Länge	33,0 cm
I.D.	7,5 mm	Magensonde	max. 18 Fr

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a. N. | Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 | Fax: +49 7454 9596-33 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

