

Vielseitig einsetzbar

- Trachealtuben
- Supraglottische Atemwegshilfen

Patientensicherheit

- Reduziertes Risiko einer Kreuzkontamination bei Einpatientengebrauch
- Kein Totraum
- Ermöglicht Messung während der Belüftung

Einzigartige Eigenschaften

- Intuitiv
- Präzise
- Ergonomisch
- Leicht zu transportieren
- Volumen- und Druckkontrolle



AG Cuffill

Digitale Spritze zur Cuffdruckmessung

AG Cuffill – Leicht – Präzise – Zuverlässig

Die Cuffdruckmessung hilft, das Risiko einer trachealen Ischämie und die daraus folgende Schädigung der Schleimhäute zu reduzieren. Die Verfügbarkeit und Präzision von Cuffdruckmessgeräten ist elementar, um gute Ergebnisse in der Cuffdruckmessung zu erzielen. AG Cuffill ist das einzige Gerät, welches die gleichzeitige Messung von

Volumen und Druck ermöglicht. Die Spritze ist leicht, einfach anzuwenden und bietet eine hohe Messgenauigkeit. Durch ihre kompakte Größe ist sie auch zur präklinischen Anwendung geeignet. Sie ermöglicht die Druckkontrolle und -regulierung bei allen Atemwegshilfen mit Cuff, insbesondere bei Niederdruckcuffs wie z.B. pädiatrischen Trachealtuben.



Digitalanzeige

Zur einfachen Anwendung und Steigerung der Messgenauigkeit.



Cuffdruck Messung

Sobald der Spritzenkolben am distalen Ende ist, erlaubt ein spezieller Sensor die Cuffdruckmessung ohne Totraum. Die Anzeige des Druckes ändert sich während des Atemzyklus.



Cuffdruck Anpassung

Sobald der Spritzenkolben in Bewegung ist, wird der Cuffdruck mit nur einer Hand gemessen und reguliert.



Minimaler Platzbedarf

Durch die geringen Dimensionen (13 x 3 x 2 cm) beansprucht der AG Cuffill sehr wenig Stauraum. Daher ist er ideal für Notfalltaschen und Fahrzeuge, Helikopter, Notarzt- und Arztkittel, Notfallschränke, etc.



Bitte beachten: AG Cuffill ist nur zur Verwendung mit luftgefüllten Cuffs vorgesehen.

Bestellinformation

AG Cuffill

limitiert auf 100 Messungen,
mit automatischer Countdown-Funktion

REF 59-10-100

VE 10

Spezifikationen

Volumen	10 ml
Messbereich	0 - 99 cmH ₂ O
Messgenauigkeit	± 2 cmH ₂ O

Vertrieb durch:

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a. N. | Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 | Fax: +49 7454 9596-33 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de